

«คำแนะนำในการชาร์จ»

1. เชื่อมต่อสายชาร์จ USB Type-C เข้ากับ USB
 2. ต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับกล่องชาร์จของเครื่องช่วยฟังของคุณ
 3. ใส่อุปกรณ์ช่วยฟังลงในกล่องชาร์จอย่างระมัดระวัง ปิดฝาเพื่อชาร์จ
- ※ ลอกสติ๊กเกอร์ออกจากเครื่องช่วยฟังของคุณก่อนทำการชาร์จ
- ※ ชาร์จอุปกรณ์ช่วยฟัง 1 คืน เมื่อใช้งานครั้งแรก



«เปิด/ปิด เครื่อง»

- เครื่องช่วยฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อนำออกจากกล่องชาร์จ โดยจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไป 10 วินาที
 - เครื่องช่วยฟังจะปิดเมื่อใส่ในกล่องชาร์จสำหรับชาร์จ
- ※ ใช้งานได้ต่อเนื่อง: ประมาณ 6 ชั่วโมง



«การใส่เครื่องช่วยฟัง»

1. นำเครื่องช่วยฟังออกจากกล่องชาร์จ
2. ใส่เครื่องช่วยฟังด้านขวา (R) เข้าที่หูขวาและใส่เครื่องช่วยฟังด้านซ้าย (L) เข้าที่หูซ้าย
3. ใส่อุปกรณ์ให้กระชับได้อย่างเหมาะสม อุปกรณ์จะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไป 10 วินาที
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เครื่องช่วยฟังทั้งสองข้างอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน
5. หากยังมีเสียงรบกวนหลังการใส่ ให้เปลี่ยนที่จุกหูฟังให้มีขนาดที่เหมาะสม



«การปรับระดับเสียง»

- การใช้เครื่องช่วยฟัง T3 (ปรับเสียงได้ 3 ระดับ)

การเพิ่ม-ลดระดับเสียง 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยแต่ละที่ปุ่มบนเครื่องช่วยฟัง

- การใช้เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนบลูทูธ (ปรับระดับเสียงได้ 15 ระดับ)

1. สลับสวิตช์ เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนบลูทูธ
2. เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนบลูทูธจะเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยฟังโดยอัตโนมัติ (ภายในระยะ 8 เมตร)
3. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ใช้เครื่องส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อปรับระดับเสียงและโหมดไมโครโฟน
4. กดปุ่ม **M** 1 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟนและกดอีกครั้งเพื่อปิด
5. ปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มบวก **+** เพื่อเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลบ **-** เพื่อลดระดับเสียง



«สิ่งสำคัญ»

- ✓ ควรเก็บเครื่องช่วยฟังในที่แห้ง และห่างจากน้ำ
- ✓ ใช้งานเครื่องช่วยฟังด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง
- ✓ ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก

«ข้อบ่งชี้การชาร์จ»

กล่องชาร์จ	ไฟ LED แสดงสถานะ
กำลังชาร์จ	 ไฟสีแดงกะพริบ
แบตเตอรี่เต็ม	 ไฟสีแดงแสดงตลอดเวลา
เครื่องช่วยฟังกำลังชาร์จ	 ไฟสีน้ำเงินแสดงค้าง 4 วินาที

เครื่องช่วยฟัง	ไฟแสดงสถานะ
กำลังชาร์จ	 ไฟสีน้ำเงินกะพริบ
แบตเตอรี่เต็ม	 ไฟสีน้ำเงินดับ

เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟน	ไฟแสดงสถานะ
กำลังชาร์จ	 ไฟสีแดงกะพริบ
แบตเตอรี่เต็ม	 ไฟสีแดงแสดงตลอดเวลา
ไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องช่วยฟัง	 ไฟสีน้ำเงินกะพริบอย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อกับเครื่องช่วยฟังโดยอัตโนมัติ	 ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ
เปิดโหมดไมโครโฟน	 แสงสีน้ำเงินแสดงตลอดเวลา
ปิดโหมดไมโครโฟน	 ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ
กำลังเชื่อมต่อ: แบตเตอรี่ต่ำ	 ไฟสีแดงกะพริบ

※ เมื่อชาร์จเครื่องช่วยฟังนานกว่า 4 ชั่วโมงและไฟแสดงสถานะการชาร์จยังคงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จใกล้หมดและจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จทันที

※ หากแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จแบตเตอรี่หมดในขณะที่กำลังชาร์จเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังจะส่งเสียงบี๊บโปรดชาร์จแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จทันที

※ บลูทูธของเครื่องช่วยฟังจะทำงานในโหมดการจับคู่แบบ "1ต่อ1" เท่านั้น เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ เช่น โทรศัพท์มือถือโปรดปิดเครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟน ในทางกลับกัน เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟน โปรดปิดอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

«ฝ่ายบริการลูกค้า»

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์

เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

เว็บไซต์: www.digibionic.co.th

โทร: 02-115-0568 (9:00 - 18:00 น.)

อีเมล: thai_service@life.digibionic.com



สอบถามทางไลน์



เว็บไซต์ของเรา